

The background is a solid blue color with a subtle grid of small white dots. On the right side, there are several faint, semi-transparent rectangular panels stacked vertically, each containing a horizontal line and a small square icon. A mouse cursor arrow is positioned over one of the icons. On the left side, there are some faint, semi-transparent curved lines and shapes, including a diamond shape.

B2B

MYSina User Manual

MySina - Was ist das?


MySina (My Smart Nursing Assistant) holt die Pflege ins digitale Zeitalter und bietet Angehörigen und Pflegekräften die Möglichkeit effizient, zielgerichtet und mit Sicherheit für die gepflegte Person da zu sein. Ausgestattet mit modernster Sensortechnologie entgeht MySina keine kritische Situation. Schnellstmögliche Hilfe wird realisiert und Sicherheit, Informationsfluss sowie Transparenz sind gewährleistet. Dafür sorgen Sensoren im Raum, die mit der Box zusammenarbeiten. In der Box werden alle Informationen aufbereitet und in der App dargestellt.

Anmeldung - Erste Schritte

Um auf die Anwendung zuzugreifen, benötigen Sie ein Konto, das von der Organisation oder IT-Care bereitgestellt wird. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse im Feld **"Benutzername"** ein und Ihr Passwort im Feld **"Passwort"**.

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie über den Link **"Passwort vergessen"** ein neues anfordern.


Sobald Sie die Informationen in den jeweiligen Feldern eingegeben haben, fahren Sie fort, indem Sie auf die Schaltfläche **"Anmelden"** klicken. Wenn Sie Probleme beim Zugriff auf die App haben, können Sie uns gerne unter **02161 2778201** anrufen oder eine E-Mail an **support@it-care.com** senden. Sie erreichen uns zu unseren Geschäftszeiten, Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr.

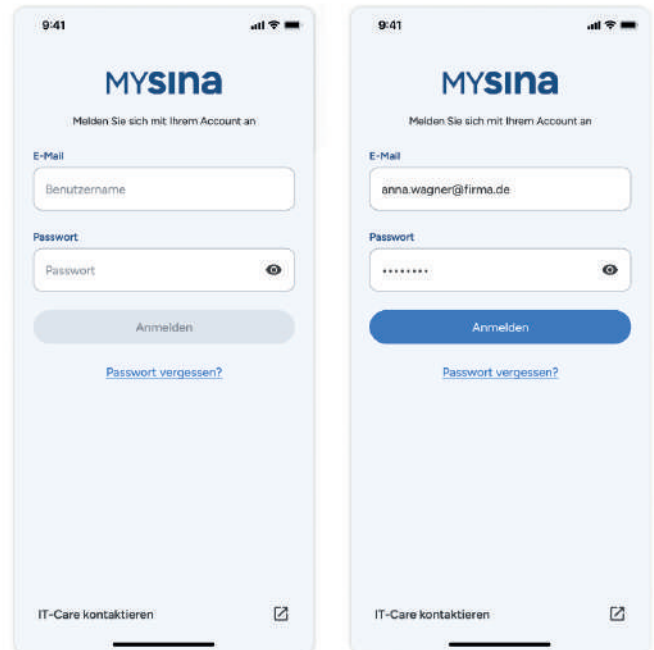

Home

Navigation - "Ereignisse", "In Arbeit" & "Bewohner"

Die aktuellen Ereignisse der betreuten Personen werden in der MySina App in **"Ereignisse"** und **"In Arbeit"** unterteilt. In **"Ereignisse"** sind Bewohner, die sofortige Aufmerksamkeit benötigen, aufgeführt. **"In Arbeit"** zeigt diejenigen an, die aktuell betreut werden. Eine Auflistung aller Bewohner der Pflegeeinrichtung finden Sie unter **"Bewohner"**.

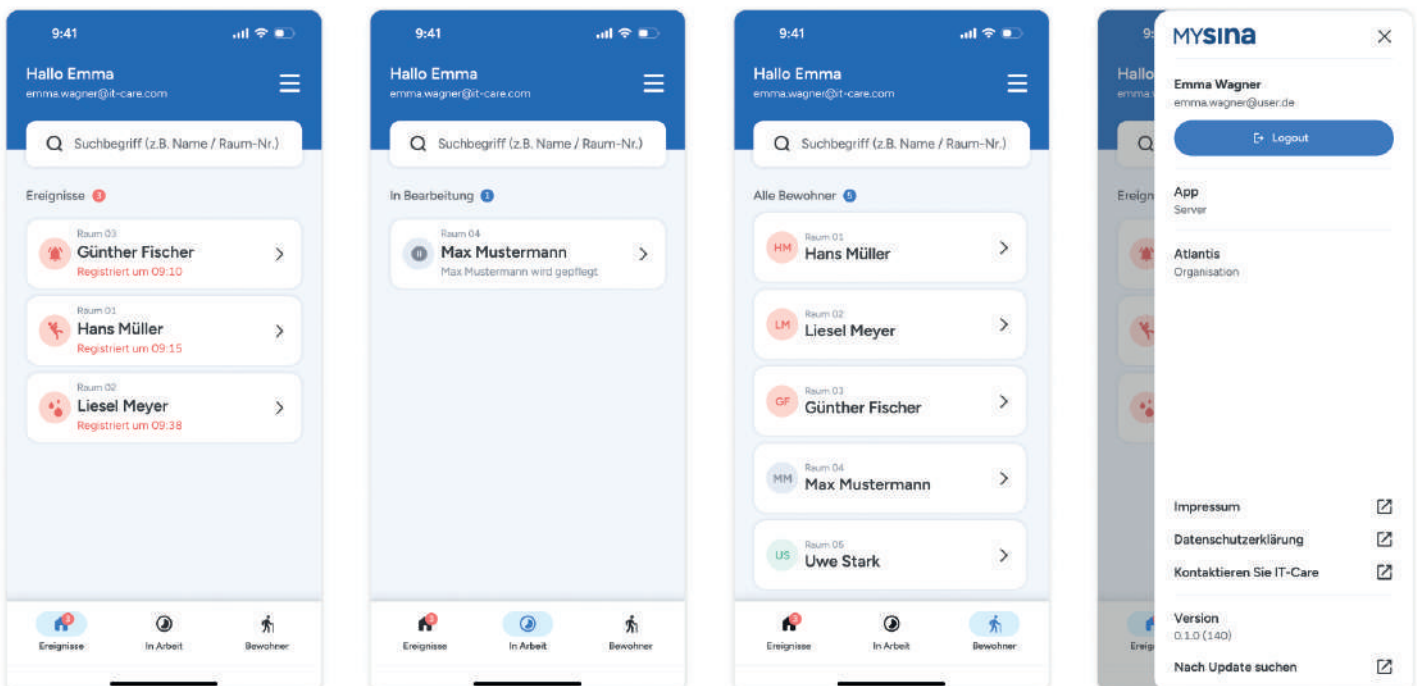


Bewohnerprofile

Beim Öffnen des Bewohnerprofils können Sie den Namen und die Zimmernummer der betreuten Person sehen, unabhängig davon, ob ein aktives Ereignis stattgefunden hat oder nicht. In der oberen rechten Ecke finden Sie detaillierte Informationen zum Akkustatus der batteriebetriebenen Sensoren.


- 1. Details:** Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die bei der Aufnahme der betreuten Person aufgezeichneten Notizen zu überprüfen. Hier finden Sie wichtige Details zur Geschichte und dem aktuellen Zustand der betreuten Person.
- 2. Kontakte:** Hier haben Sie direkten Zugriff auf Notfallkontakte, sodass Sie bei Bedarf schnell mit Rettungsdiensten, technischem Support oder der Familie der betreuten Person kommunizieren können.
- 3. Historie:** In diesem Abschnitt können Sie die erfassten Sensor-Alarme über einen bestimmten Zeitraum beobachten. Dies gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitätsmuster und die Entwicklung der betreuten Person.
- 4. Vitaldaten:** In diesem Modul haben Sie die Möglichkeit diverse Vitalwerte manuell zu hinterlegen. Die Dokumentation der Vitaldaten ermöglicht es Ihnen, die Werte über einen genauen Zeitraum zu beobachten.

Zusätzlich werden auf diesem Bildschirm alle Sensoren und ihr aktueller Status angezeigt. Dringliche Ereignisse, die eine Handlung erfordern, sind rot markiert. Sensoren die ordnungsgemäß funktionieren und kein Alarm-Ereignis wahrnehmen werden grün angezeigt. Deaktivierte Sensoren, die nicht im System integriert wurden, werden grau dargestellt.

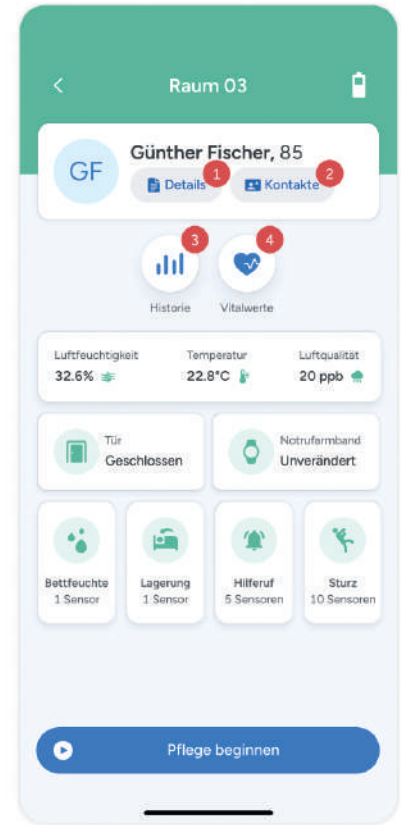

Pause-Funktion und Alarm Bearbeitung

Durch Drücken des "Pause" Knopfes können Sie die Sensoren für einen ausgewählten Zeitraum deaktivieren, um die betreute Person ohne Unterbrechungen zu versorgen.

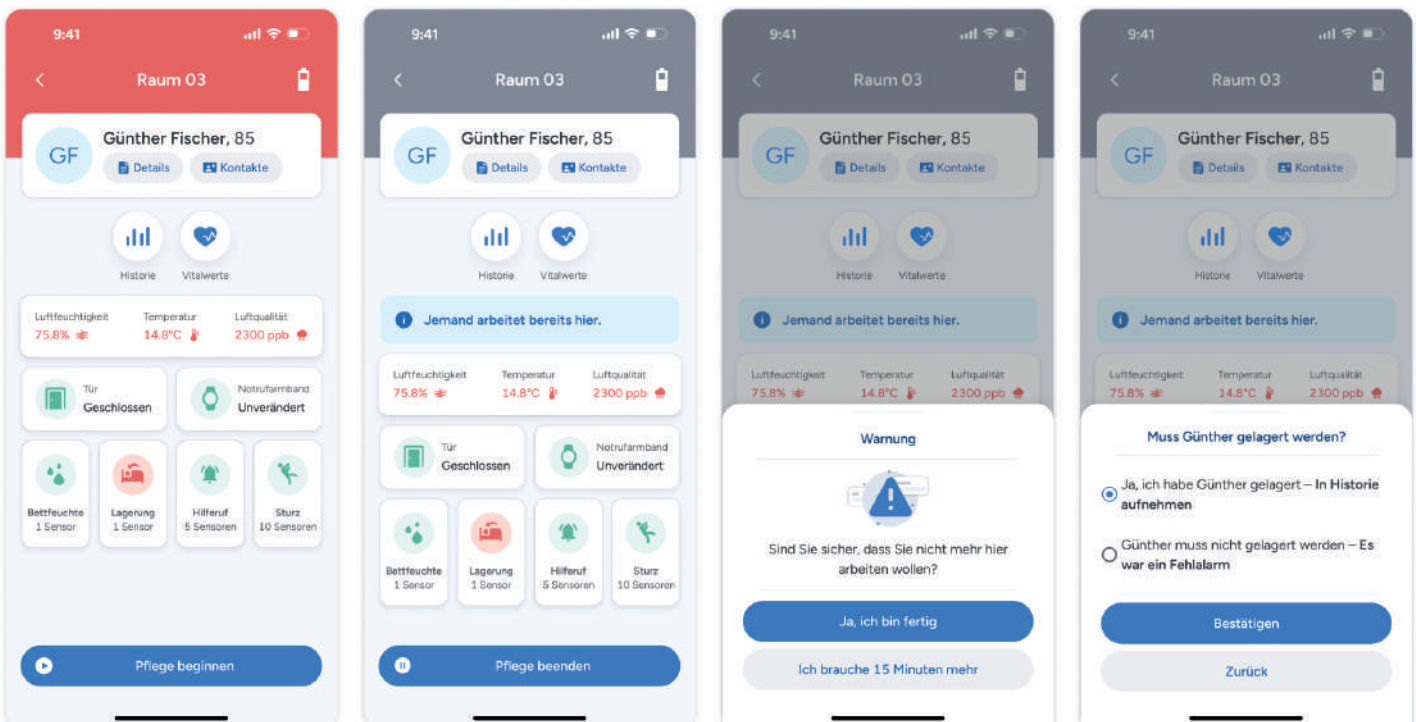

Aktivierung der "Pause"-Funktion



Drücken Sie den "Pflege beginnen" Knopf um die Sensoren im Zimmer der Person zu pausieren. Alarm-Ereignisse werden ebenfalls über die Pause-Funktion bearbeitet.

Beenden der Pause-Funktion

Drücken Sie "Pflege beenden" um die Pause zu beenden. Wenn zuvor ein Alarm-Ereignis des Typs Bettfeuchte, Lagerung, Hilferuf oder Sturz stattgefunden hat, können Sie dieses nun in die Sensorhistorie aufnehmen, oder angeben, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Dazu wird Ihnen automatisch ein Fenster mit den entsprechenden Antwortmöglichkeiten angezeigt. Sobald Sie dieses bestätigen, wird der Status des Sensors wieder auf grün gesetzt.


Multisensor-Ansicht

Über unsere Multisensor-Ansicht können sie die Daten aller Sensoren eines Sensortyps einsehen. Dazu klicken Sie einfach auf die Hilferuf- oder Sturz-Kachel und erhalten Einblick, ob die verbauten Sensoren in Betrieb oder ausser Betrieb sind, oder ob einer der Sensoren einen Alarm geschlagen hat.

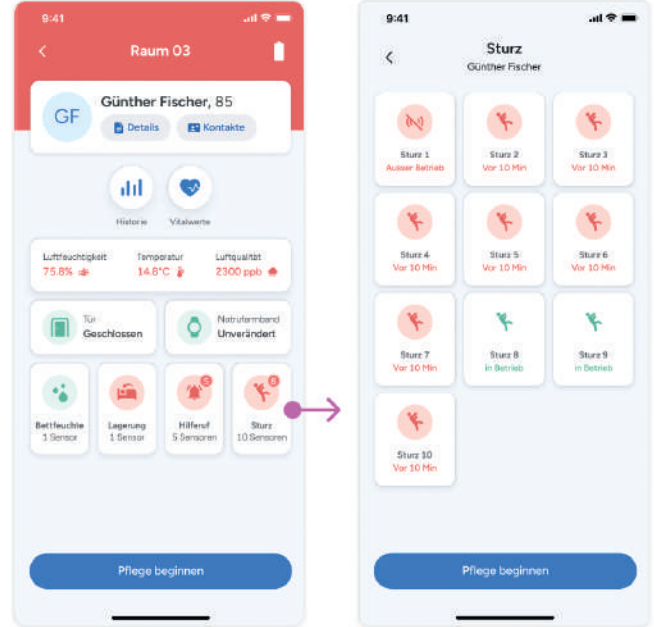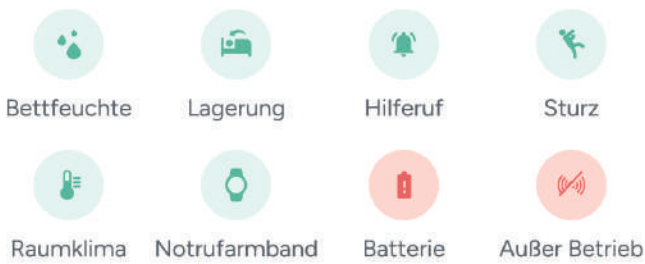

Historie - Sensorverlauf

In dieser Übersicht können Sie die bestätigten Alarm-Ereignisse einer Person über einen bestimmten Zeitraum einsehen. Durch den Klick auf einen Balken werden Ihnen die Ereignisse aus dem gewählten Zeitraum angezeigt. Weitere Informationen zum genauen Datum oder der Uhrzeit erhalten Sie, wenn Sie auf eine der unteren Karten klicken.

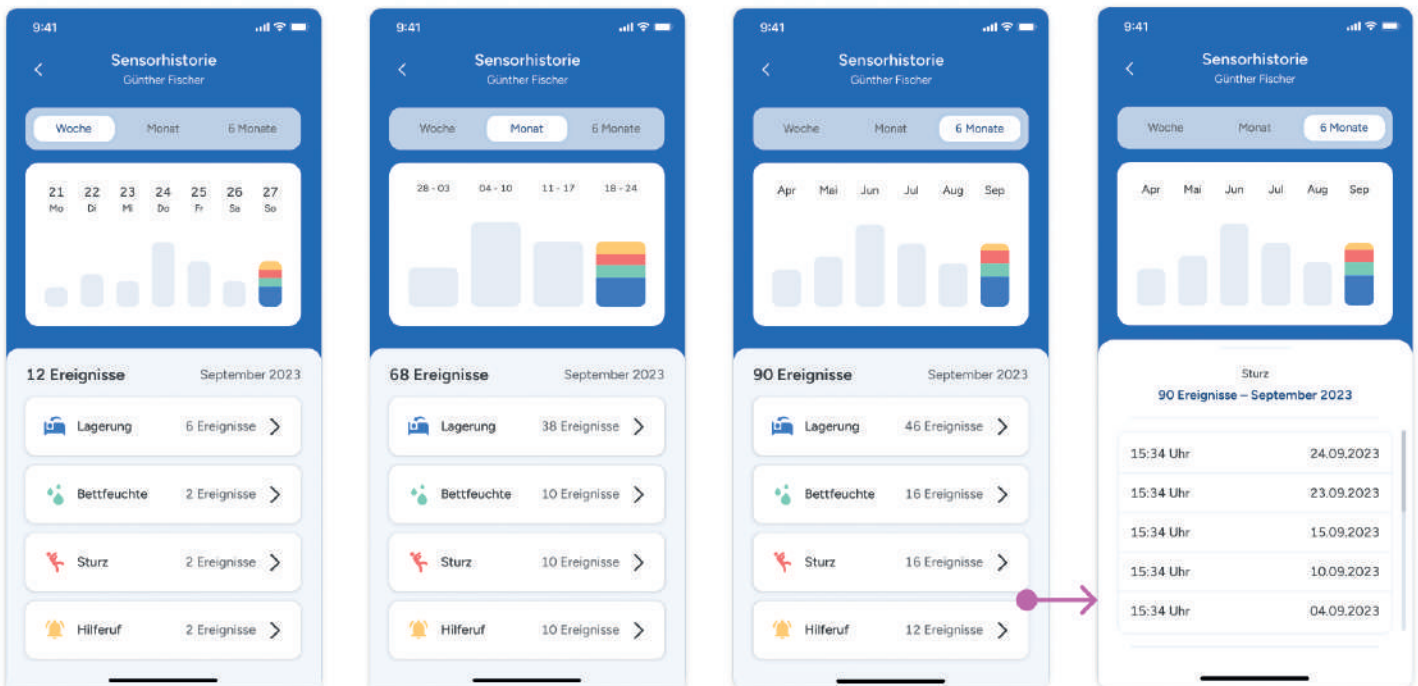


Notrufarmband

Im Notfall wird ein Alarm ausgelöst, um Sie darauf hinzuweisen, dass die Taste gedrückt wurde. Wenn Sie den Raum öffnen, können Sie sehen, was passiert ist.


Tippen Sie auf "SOS-Notruf", um die Details des Alarms zu sehen.

Sie können zu jedem Zeitpunkt sehen, wo sich die Person befindet. Auch wenn kein Alarm ausgelöst wurde.

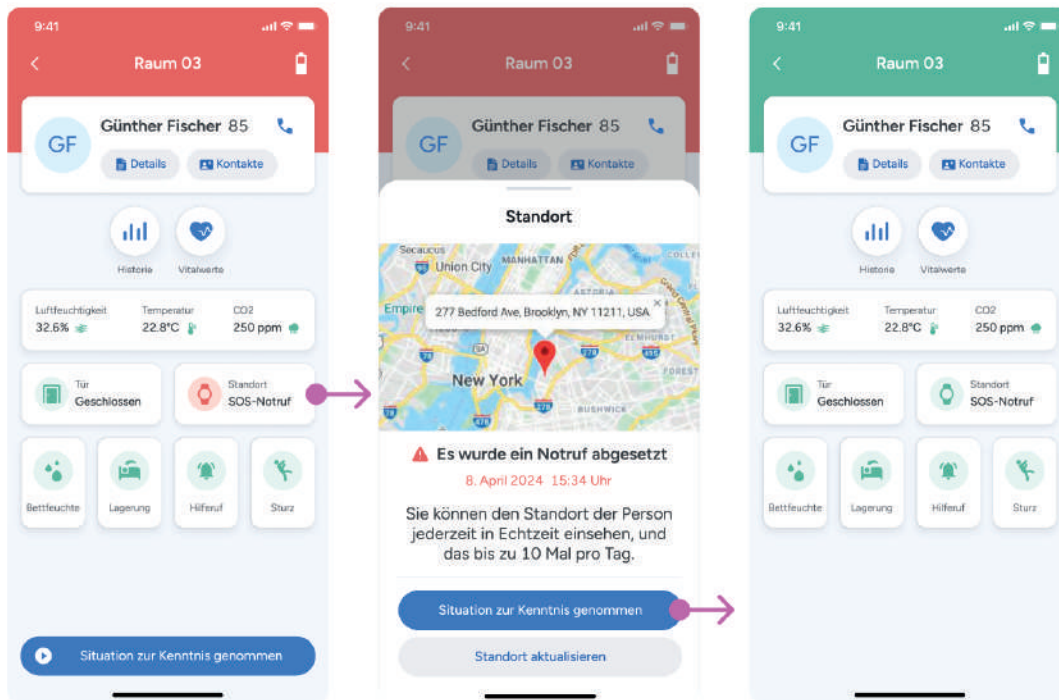

Armband anrufen

Klicken Sie auf die Telefontaste , um den Bewohner direkt anzurufen. Das Symbol wird angezeigt, wenn Anrufe aktiv sind.

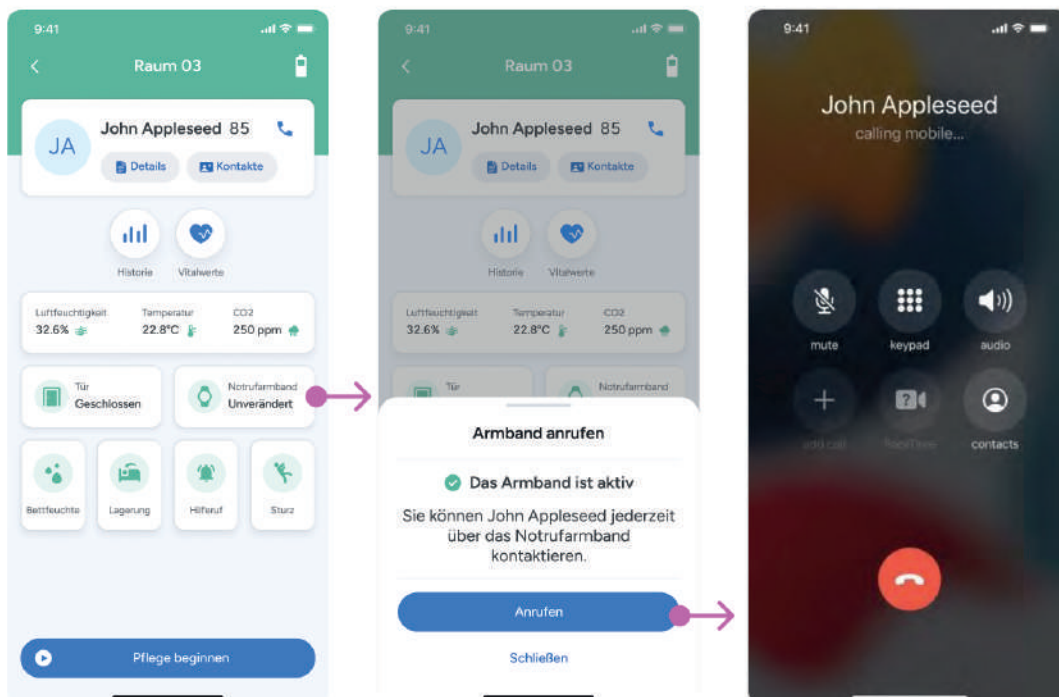


Vitalwerte

In diesem Modul können Sie acht verschiedene Vitalwerte dokumentieren.


Wert hinzufügen

Um einen Wert hinzuzufügen, tippen Sie auf das Plus, wenn zuvor noch kein Wert hinterlegt wurde. Sollten bereits Daten gepflegt worden sein, wählen Sie einfach die gewünschte Karte aus und drücken Sie auf "+ neuer Wert" um einen weiteren Eintrag zu hinterlegen.

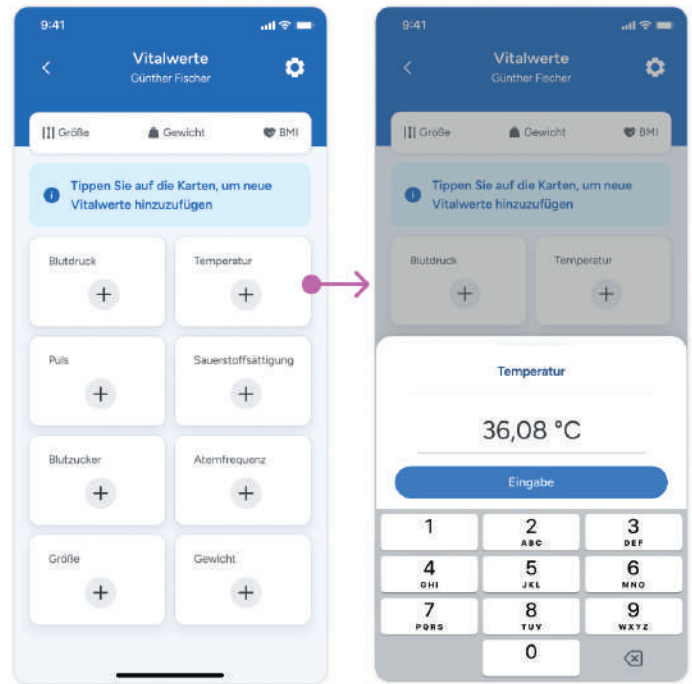

Detailseite der einzelnen Vitalwerte

Auf der Detailseite der einzelnen Vitalwerte finden Sie einen Informationstext, sowie eine Auflistung aller Einträge inklusive Datum und Uhrzeit der jeweiligen Messung. Um einen Eintrag zu löschen, swipen Sie den Eintrag einfach nach links.

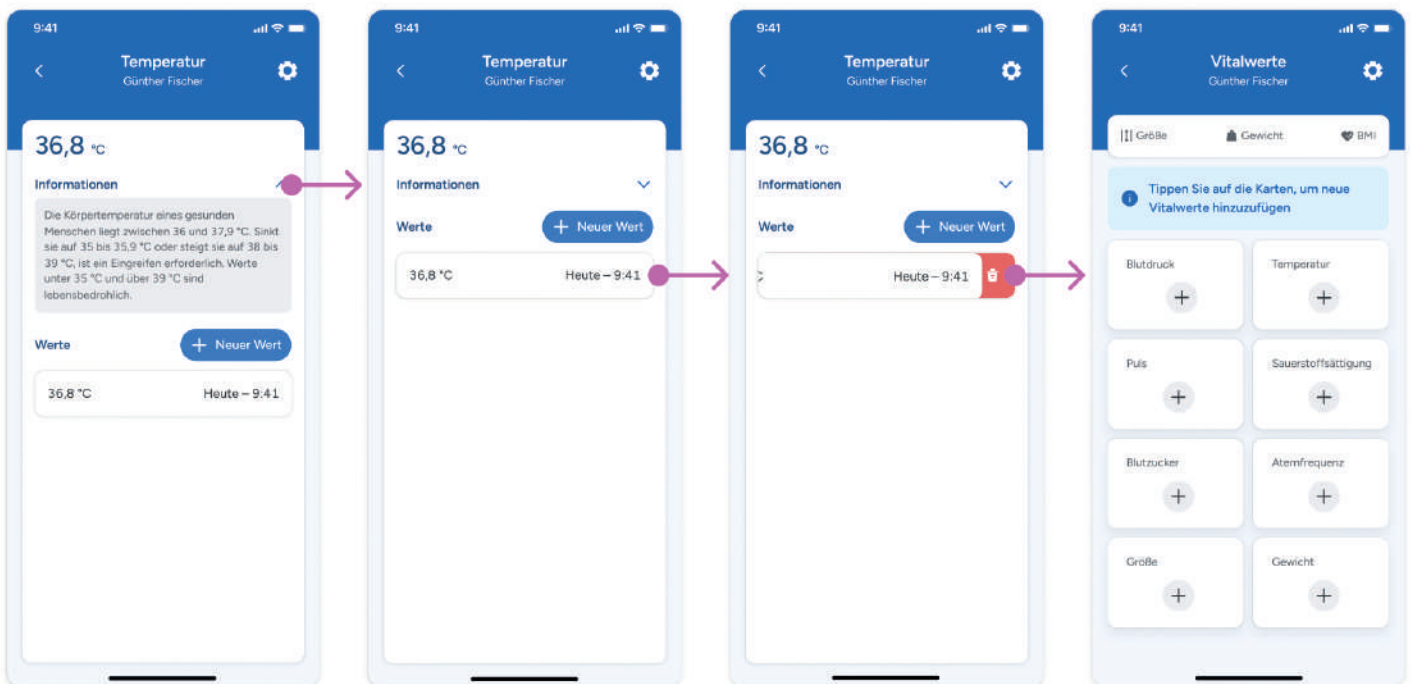

Übersicht - Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung liefert Ihnen die Informationen, die Sie zur Arbeit mit MySina-App brauchen.

